

VelaShape® III

Mejora y control
de los tratamientos corporales
maximizando el ROI

Libro electrónico



 **CANDELA™**
Science. Results. Trust.





Estimado/a lector/a:

En nombre de Candela Corporation, queremos agradecerle su interés en VelaShape® III, nuestro exitoso dispositivo para un modelado corporal cómodo y no invasivo. En este libro electrónico, incluimos la información más importante sobre este dispositivo, desde una descripción general de la tecnología hasta algunos de los resultados que los expertos clínicos de todo el mundo han logrado con sus pacientes.

Puede estar seguro de que cuando decida trabajar con uno o más de nuestros dispositivos, haremos todo cuanto esté en nuestra mano para proporcionarle el mejor servicio al cliente posible.

¡Prometido!

El equipo de Candela Marketing.

¿Qué puede tratar?

El sistema VelaShape III proporciona una solución exitosa para el modelado corporal confortable y no invasivo en una amplia gamma de pacientes y zonas de tratamiento. Se ha demostrado que reduce temporalmente la celulitis, el contorno de los muslos y el abdomen (zonas que las mujeres de todo el mundo identifican como problemáticas) mediante un tratamiento terapéutico profundo que ofrece resultados homogéneos y reproducibles con un tiempo de reposo mínimo y molestias muy limitadas.

Tratamientos de modelado corporal no invasivos

Destrucción de la grasa

Celulitis

Reducción del contorno

1. VelaShape III cuenta con el sello CE para tratamientos no invasivos de modelado corporal mediante la reducción temporal de la celulitis y del contorno corporal.

Ventajas para los pacientes

Ofrezca a sus pacientes lo que buscan:

la garantía de los resultados demostrados Con más de diez años de experiencia clínica y más de cinco millones de sesiones de tratamiento, VelaShape es el dispositivo médico de modelado corporal que cuenta con más estudios publicados y uno de los tratamientos de modelado corporal no invasivos que goza de mayor reconocimiento en el mercado actual.

Potencia y velocidad. El dispositivo VelaShape III puede alcanzar la temperatura final en menos tiempo, con una potencia de radiofrecuencia (RF) de hasta 150 vatios, lo cual reduce el tiempo necesario para el tratamiento.

Comodidad. El procedimiento con VelaShape III es tan cómodo como un masaje con piedras calientes.

Conveniencia. El procedimiento con VelaShape III suele durar menos de una hora.

Para cualquier época del año. El dispositivo VelaShape III puede utilizarse en todos los tipos de piel, en cualquier época del año y en cualquier clima.

Ventajas para la consulta



Atraer nuevos clientes.

Los tratamientos con VelaShape III tienen precios asequibles que le permitirán incorporar pacientes a su clínica atendiendo a sus capacidades de modelado corporal.

Versatilidad de tratamiento.

Con el dispositivo VelaShape III, puede tratar una amplia gama de necesidades, edades y tipos de piel.

Un negocio constante.

El programa VelaShape III logrará que los pacientes vuelvan, y cada visita implica una mayor exposición al resto de ofertas estéticas de su clínica.

Una importante fuente de ingresos.

Los tratamientos pueden agruparse en paquetes de cuatro, seis, ocho o más sesiones.

Fácil de usar.


El diseño intuitivo del sistema VelaShape III le permitirá delegar los procedimientos en al personal sanitario adecuado.

Uso sinérgico de energías

El sistema VelaShape III utiliza una combinación de modalidades:

- La luz infrarroja (IR) calienta el tejido superficialmente
- La radiofrecuencia (RF) bipolar calienta el tejido hasta 20 mm de profundidad
- La tecnología de vacío garantiza un suministro preciso de energía
- La manipulación mecánica mejora el drenaje linfático y la reducción de la celulitis

La combinación de tecnología infrarroja y de radiofrecuencia combinada con vacío permite el calentamiento profundo de las células grasas (adipocitos), los septos fibrosos conjuntivos que las rodean y las fibras de colágeno dérmicas subyacentes. El calentamiento eficiente de los adipocitos se logra con una mayor salida de radiofrecuencia.

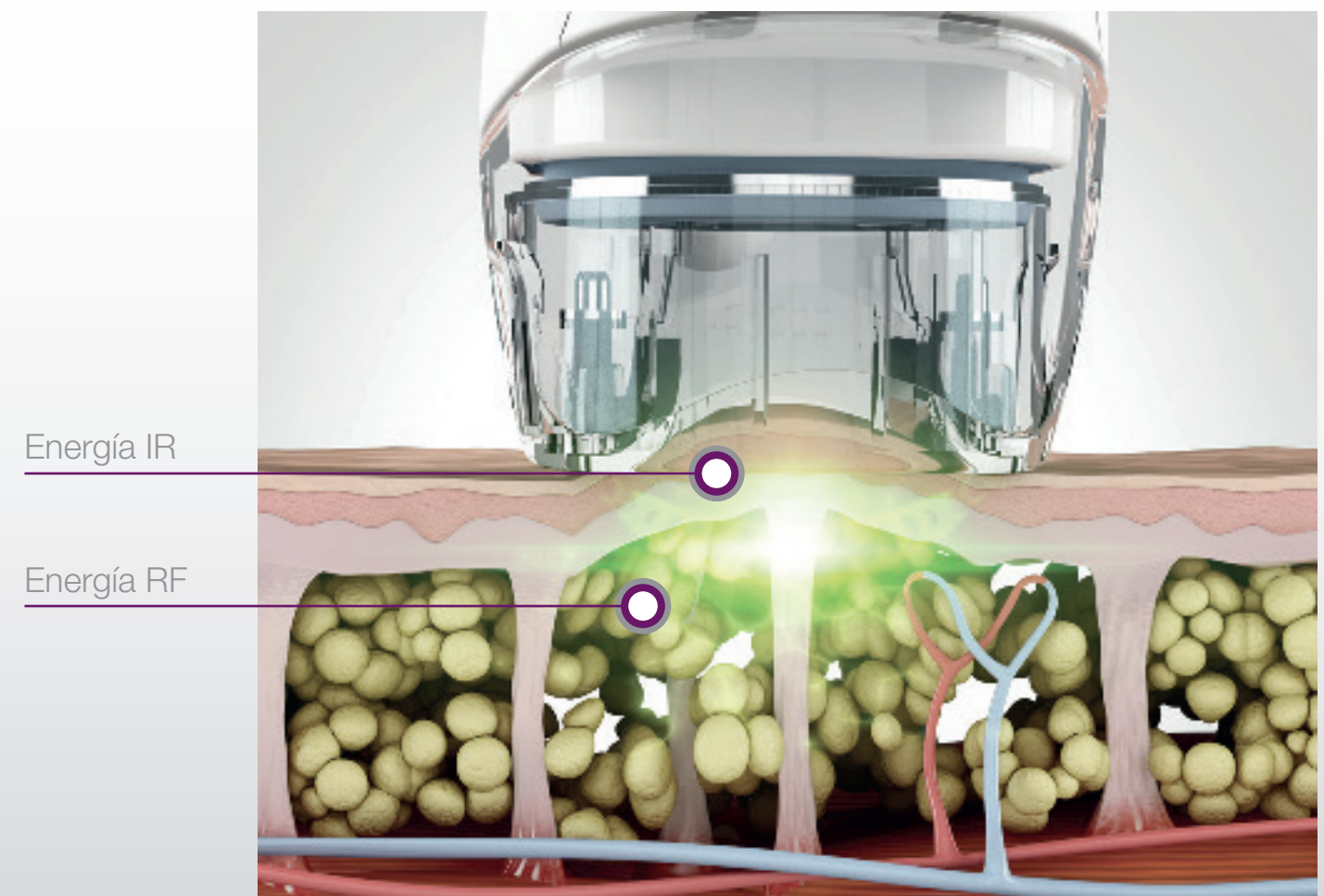


Resultados | Estiramiento. Firmeza. Modelado


Resultados | Estiramiento. Firmeza. Modelado




Fotos proporcionadas por la Dra. Eun Hee Kang

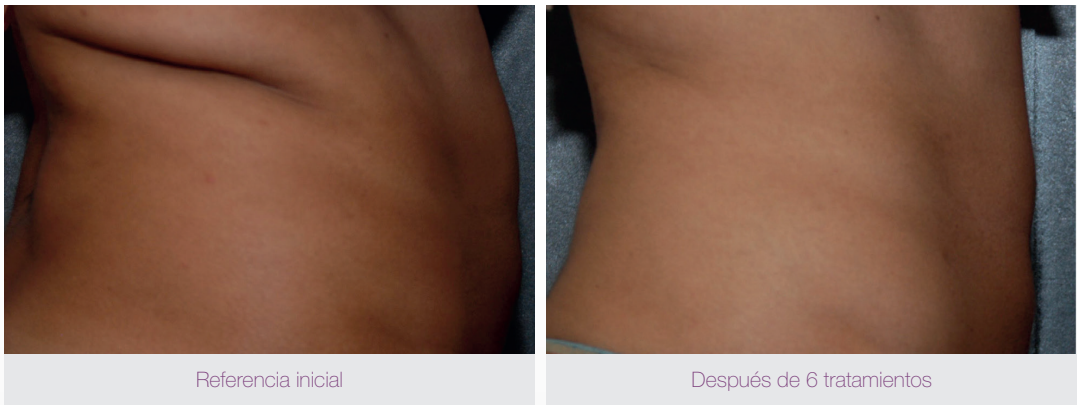

Fotos proporcionadas por la Dra. Echo V. Rowe

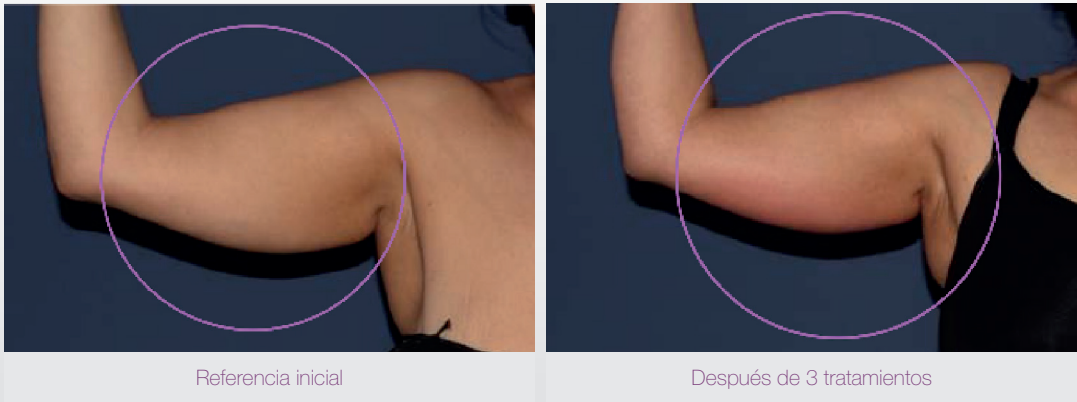


Fotos proporcionadas por el Dr. Ariel Haus

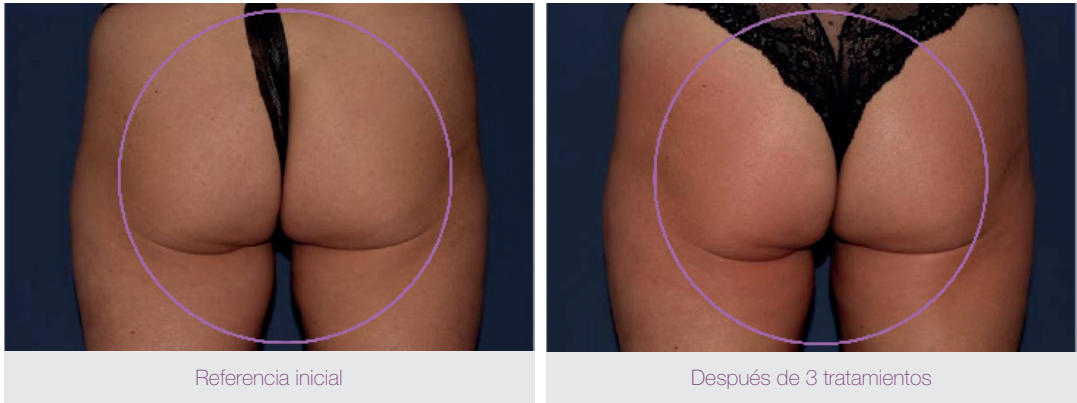

Fotos proporcionadas por el Dr. Ariel Haus




Fotos proporcionadas por el Dr. Gerald Boey

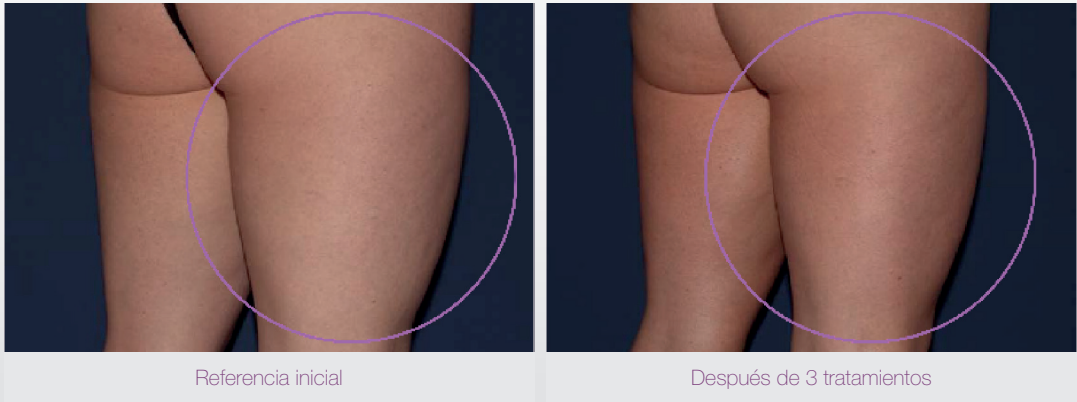

Fotos proporcionadas por el Dr. Ariel Haus

Resultados | Estiramiento. Firmeza. Modelado

Resultados | Estiramiento. Firmeza. Modelado

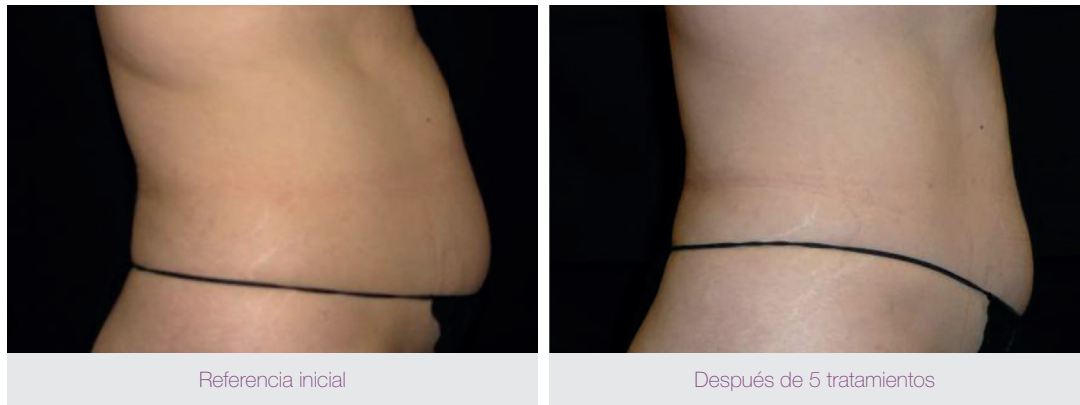

Fotos proporcionadas por el Dr. M. Winter




Fotos proporcionadas por la Dra. Ruthie Amir




Fotos proporcionadas por el Dr. T. Becker



Fotos proporcionadas por la Dra. Lori Brightman

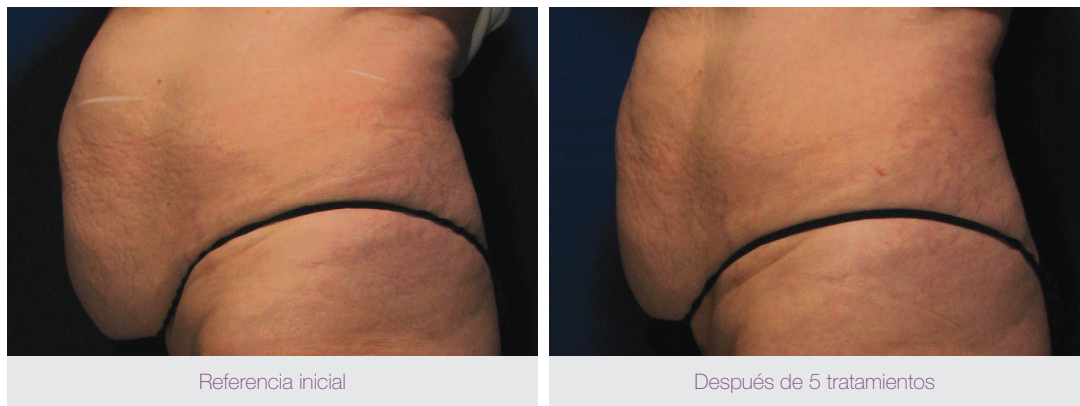

Fotos proporcionadas por la Dra. Ruthie Amir

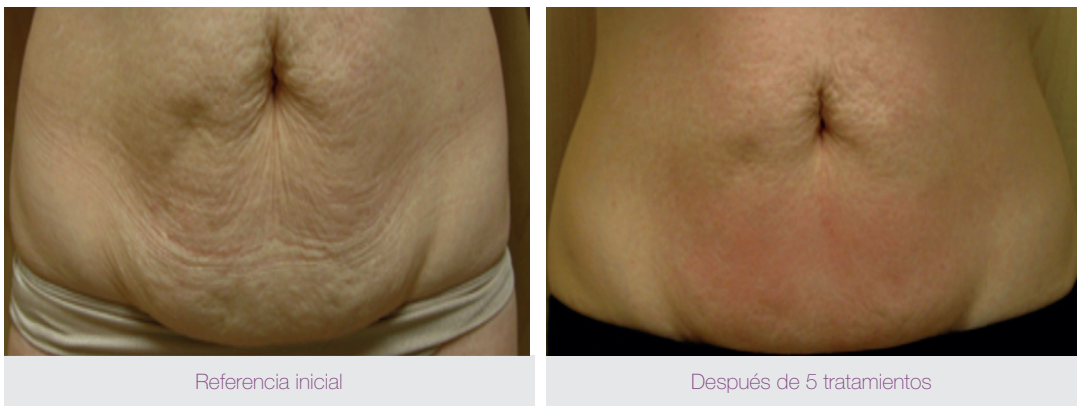

Fotos proporcionadas por Longevity Medical Clinic.

No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes.

“El tratamiento corporal más popular en mi clínica es VelaShape III. Algunos pacientes notan mejoras desde la primera sesión.”



Ariel Haus - Dermatólogo
Dr. Haus Dermatologist Clinic, Harley Street

“Después de probar muchas tecnologías para tratar la celulitis y los depósitos de grasa, por fin puedo ofrecer a mis clientes un tratamiento seguro y eficaz que garantiza resultados visibles desde la primera sesión. VelaShape III ha demostrado ser un procedimiento indoloro y mis pacientes pueden retomar su actividad habitual el día después.”



Dra. Virginia Benítez
Humanline Banús Hospital, España

“Con VelaShape hemos visto grandes resultados de forma sistemática. Muchos de nuestros pacientes han perdido hasta 5 centímetros en la zona de la cintura y el abdomen.”



Dra. Lori Brightman
Dermatóloga colegiada, Nueva York

“El sistema VelaShape III ofrece al mercado un avance tecnológico en los tratamientos para la celulitis. Estoy seguro que puedo ofrecer a mis pacientes un tratamiento que va a mejorar su celulitis. De hecho, VelaShape III es una inversión fantástica para fidelizar a los clientes y, al mismo tiempo, para mejorar nuestro prestigio como profesionales sanitarios.”



Dra. Adriana Ribé
Ribé Clinic, España

Resumen de artículos revisados por pares

Un estudio clínico prospectivo para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento de la celulitis utilizando la combinación de energías ópticas y de RF para el calentamiento del tejido subcutáneo.

Sadick NS, Mulholland RS.

Tratamiento de la celulitis utilizando un dispositivo novedoso que combina radiofrecuencia, luz infrarroja y manipulación mecánica del tejido.

Alster TS, Tanzi EL.

Evaluación de la combinación de radiofrecuencia, energía infrarroja y rodillos mecánicos con succión para mejorar las irregularidades de la superficie de la piel (celulitis) en un área limitada de tratamiento.

Kulick M.

Tratamiento de la celulitis con un dispositivo de radiofrecuencia bipolar, calor infrarrojo y succión pulsátil: un estudio piloto.

Wanitphakdeedecha R, Manuskiatti W.

Modelado corporal post-embarazo utilizando un dispositivo combinado de radiofrecuencia, luz infrarroja y manipulación del tejido.

Winter ML

Mejora de los depósitos de grasa y la laxitud de la piel posparto en brazos, costados y abdomen utilizando un dispositivo de radiofrecuencia bipolar, infrarrojos, vacío y masaje mecánico.

Brightman L, Weiss E, Chapas AM, Karen J, Hale E Bernstein, L Geronemous R.

Reducción del volumen de tejido adiposo utilizando una nueva tecnología de radiofrecuencia de alta potencia combinada con luz infrarroja y manipulación mecánica para el modelado corporal.

Adatto, M., et al.

Principales conclusiones de las revisiones por pares:



Relevancia estadística, reducción sostenible del contorno y mejora del aspecto de los brazos y el abdomen después del tratamiento.



Resultados significativos en pocas sesiones sin poner en riesgo la seguridad o el confort de los pacientes.



Sugieren que el mayor nivel de energía de radiofrecuencia bipolar de VelaShape III podría producir un calentamiento más intenso de los tejidos sobre los que se aplica, lo que se traduce en un tratamiento más rápido y un mejor resultado clínico.



Tratamiento con muy buena tolerancia



Grado elevado de satisfacción de los pacientes

PREMIOS

Mejor tratamiento basado en energía para alcanzar objetivos estéticos de la cabeza a los pies en 2019.

Otorgado por el Dr. Sanjay Grover, cirujano plástico de Newport Beach, California.

y



Especificaciones del sistema

Potencia de radiofrecuencia	Hasta 150 W
LED infrarrojos	hasta 3,2 W
Espectro lumínico	850 nm
Vacío	Pulsado
Peso:	44 lbs / 20 kg
Dimensiones [ancho x profundidad x altura]	15 x 19 x 52" 38 x 49 x 132 cm
Requisitos eléctricos	110 VCA; 5 A; 50 Hz; Monofásica 230 VCA; 2,5 A; 50 Hz; Monofásica



Aviso legal: Todo el contenido de este documento se proporciona únicamente a título informativo y Candela lo ofrece sin ningún tipo de garantía. Los profesionales sanitarios tendrán la responsabilidad exclusiva de evaluar de forma independiente la adecuación de cualquier producto para un uso concreto y de conformidad con la normativa específica del país. La disponibilidad de los productos y las indicaciones mencionadas en el presente documento quedan sujetas a los requisitos normativos y al estado de tramitación del registro del producto en cada país. Para más información específica de cada país, véase el Manual de instrucciones. Los productos y las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Para más información, póngase en contacto con Candela.

© 2019 Candela Corporation. El presente documento contiene marcas registradas y no registradas, nombres comerciales, marcas de servicios y nombres de marcas de Candela Corporation y sus empresas asociadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. PU04191EN, Rev. 00

CE 0344

